




Comment utiliser un défibrillateur ?



Restez calme et suivez les instructions du défibrillateur



Commencez par dénuder la poitrine de la victime. Enlevez ou découpez les vêtements si nécessaire.

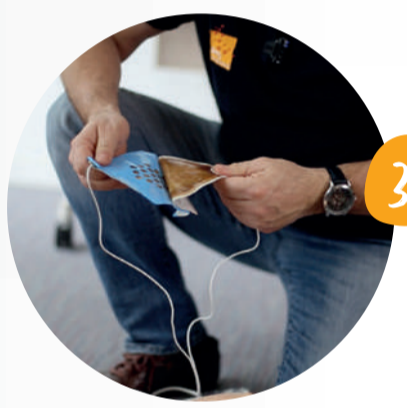

Enlevez le sachet du couvercle du défibrillateur puis déchirez le sachet et sortez les électrodes.



Appliquez fermement la 1^{ère} puis la 2^{ème} électrode sur la poitrine de la victime exactement comme illustré sur les électrodes.



Le défibrillateur analyse ensuite le rythme cardiaque de la victime. Si le défibrillateur indique que le choc est déconseillé... Réalisez à nouveau un massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours

Explications en vidéo de Franck Corbino

